

試料搬送用セット

【セット内の製品は全6種類】



【別売りホルマリン】



※分注済みホルマリンは
搬送セットには含まれていません

採取後の口腔試料を各施設へ搬送するためのセットになります。

別売りの分注済みホルマリンと合わせてご使用下さい。

搬送セット詳細

- ① 搬送用氏名ラベル
- ② 搬送用吸着剤
- ③ 梱包用ラベル
- ④ 梱包用緩衝材
- ⑤ 搬送用キップ付き容器
- ⑥ 梱包用段ボール

※箱サイズ:160mmx160mmx105mmH

各種10個入

分注済みホルマリン詳細

【商品名】 10%中性緩衝ホルマリン1号パック入

【商品コード】 FB0010RA0P1-01EC

【入数／梱包形態】 10個/10個入パックx1

【容器サイズ】 24.5φx45mmH

ご注文時は下記表の製品を合わせてご注文下さい

試料搬送用セット

EC001-10	10セット分/各製品10個 (6品目)	¥ 6,100(税抜き)
10%中性緩衝ホルマリン1号 パック入		
FB0010RA0P1-01EC	10個/10個入パック x 1	¥ 2,500 (税抜き)

分注済みホルマリンが必要ない場合は空容器が含まれた別セットのご用意もございます。
詳しくは販売メーカーにお問合せ下さい



Asiakizai



お問い合わせはコチラ



使用方法の説明

①



②



検体の入った容器に
氏名ラベルを貼り付けます。

検体の入った容器を
搬送用吸着剤で包み込みます。

③



※キャップはしっかり締めて下さい

吸着剤で包んだ容器を
搬送用キャップ付容器に入れます。

④




梱包用段ボールを組み立てます。
底の面にテープを貼り補強します。

⑤



搬送用容器を緩衝材で包みます。
必要書類を忘れず同封！

⑥

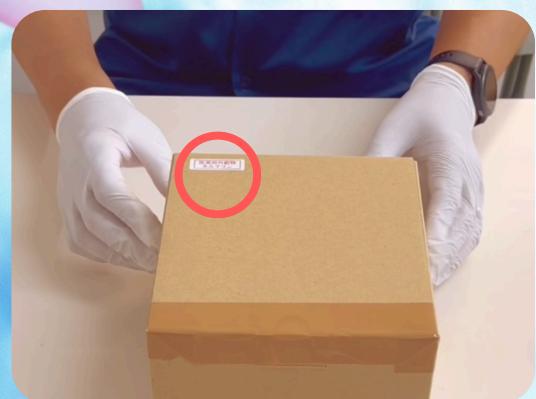

梱包用ラベルを貼り付けて
作業完了です。

使用方法を説明している動画のご準備もございます。
ご使用する前に動画をご覧下さい。

動画はコチラから

